

## NAVODILA ZA UPORABO

### ROČNA PRSNA ČRPALKA BABY-NOVA, art. št. 32240

Veseli nas, da ste se odločili uporabljati BABY-NOVA ročno prsno črpalko in upamo da bo vam in vašemu dojenčku v pomoč.

#### Vsebina:

- 1x plastični zbiralnik mleka – brez BPA
- 1x pokrovček za zbiralnik mleka
- 1x tesnilna podložka in zaščitni pokrovček
- 1x ščetka za čiščenje zbiralnika mleka
- 1x silikonski cucelj za zbiralnik mleka



#### Prednosti ročne prsne črpalke BABY-NOVA:

- pripomore k povečanju laktacije,
- enostavna in udobna enoročna uporaba,
- preprosto razstavljiv sistem za črpanje, ki je enostaven tudi za čiščenje in z minimalnim številom delov,
- mleko se črpa direktno v plastični zbiralnik mleka,
- zaščitni pokrovček omogoča varno in higiensko shranjevanje ter transport.

#### PRED PRIČETKOM ČRPANJA

Pred pričetkom črpanja sterilizirajte vse dele prsne črpalke, tako da jih položite v vrelo vodo za približno 3 minute, **nikakor pa v vrelo vodo ne postavljajte ščetko za čiščenje zbiralnika mleka**. Zagotovite da posoda z vrelo vodo ves čas vsebuje dovolj vode, ter da se deli lahko nemoteno premikajo v vodi. V nobenem primeru deli ne smejo biti pritisnjeni ob dno posode.

Pred vsakim pričetkom črpanja mleka si temeljito umijte roke z milom ter nežno obrišite prsi z vlažno krpo nato sestavite prsno črpalko (potrebno je sestaviti tesnilni vložek in bat zbiralnika mleka). Vzemite si čas in se pripravite na črpanje – ustvarite si prijetno vzdušje ter se udobno namestite. Črpalka je posebej oblikovana – tako da omogoča udobnejše črpanje mleka med sedenjem.

#### KAKO ZAČETI ČRPATI

Pritisnite nastavek za prsi nežno na prsi, da povsem zaprete odprtino. Sedaj ste pripravljeni na črpanje. Pritisk črpanja se ustvari z vašim ročnim pritiskanjem (s pritiskanjem bata na zbiralnik mleka). Istočasno lahko z drugo roko masirate dojko, za boljši iztisk mleka. To pomaga pretoku mleka in olajša črpanje. Mleko črpajte iz obeh dojk, razen če vam porodna babica, zdravnik ali svetovalka za dojenje svetujejo drugače. Mleko teče direktno v zbiralnik mleka na katerega lahko privijete silikonski cucelj in po črpanju takoj nahranite dojenčka, ali pa zbiralnik mleka zaprete s pokrovčkom in ga shranite v hladilnik za kasnejšo uporabo.

#### PO ČRPANJU

Po črpanju razstavite prsno črpalko z dvema enostavnima potezama, da nahranite otroka ali shranite mleko. Če želite z mlekom dojenčka takoj nahraniti, potem na lahko na zbiralnik

mleka pritrdite cucelj z navojem za posodo. Če želite mleko shraniti v hladilniku, potem uporabite tesnilni pokrovček in pokrov za zbiralnik mleka. Pozor, mleko lahko v hladilniku hranite največ 24 ur pri temperaturi, ki ne presega 7°C. Črpalko ponovno sestavite s pritiskom navzdol.

### **ČIŠČENJE, NEGA IN SHRANJEVANJE**

Ročno prsno črpalko Baby-Nova morate sterilizirati / očistiti pred prvo uporabo in ob vsaki naslednji uporabi. Posebno pozornost namenite delom, ki pridejo v stik z načrpanim mlekom. Najprej razstavite črpalko. To storite tako, da odstranite enoto za črpanje in odvijete nastavek za prsi z zbiralnika mleka. Vse dele črpalke temeljito očistite pod toplo tekočo vodo ter po potrebi uporabite ščetko za čiščenje zbiralnika mleka. Nato sterilizirajte vse dele črpalke, ki pridejo v stik z načrpanim mlekom.

### **STERILIZACIJA Z VRELO VODO**

Dele prsne črpalke položite v vrelo vodo za približno 3 minute. Zagotovite da posoda z vrelo vodo ves čas vsebuje dovolj vode ter da se deli črpalke lahko nemoteno premikajo v vodi. V nobenem primeru deli ne smejo biti pritisnjeni ob dno posode.

### **OPOZORILO: Ne sterilizirajte v mikrovalovni pečici ali loncu na pritisk (ekonom loncu)!**

Po sterilizaciji vse dele črpalke spet sestavite skupaj.

### **OPOZORILO ZA STEKLENIČKE: Zbiralnik mleka ročne črpalke je namenjen samo in izključno hranjenju z načrpanim mlekom!**

### **Za varnost in zdravje vašega otroka: OPOZORILO!**

Vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe. Nikoli ne uporabljajte cuceljev za hranjenje kot nadomestilo za dudo. Vedno preverite temperaturo hrane, predno jo postrežete otroku. Stalno in dolgotrajno sesanje tekočin povzroča karies. Slednje posebej velja za sladkano hrano in pijačo, kiselkasto sadje in zelenjavne sokove. Ne namakajte cuceljev v zdravila. Vse črpalnine komponente, ki jih ne uporabljate, morajo biti izven dosega otrok. Majhne dele otrok lahko pogoltne, kar predstavlja tveganje za zadušitev.

Pred prvo uporabo sterilizirajte zbiralnik mleka, cucelj in pripomočke, tako da jih pustite 3 minute v vreli vodi. Po vsaki uporabi bi morali biti zbiralnik mleka, cucelj in pripomočki temeljito očiščeni pod vročo tekočo vodo ter redno sterilizirani v vreli vodi cca. 3 minute. V izogib poškodbam vedno preverite, da je v posodi z vrelo vodo dovolj tekočine. **Ni primerno za uporabo v mikrovalovni pečici ali loncu na pritisk (ekonom loncu).** Preizkusite cucelj in zbiralnik mleka pred vsako uporabo. Ustreznost cucelja preizkusite s potegi v različne smeri in s čimer preizkusite odpornost proti pretrganju. Ne izpostavljajte cucelja neposredno sončni svetlobi ali vročini. Ne puščajte cucelja v dezinfekcijskem sredstvu več kot je priporočljivo, saj lahko sredstvo poškoduje cucelj. **Zamenjajte** cucelj z novim nenudoma ob prvem znaku poškodbe - nevarnost zadušitve! Zaradi varnostnih in higenskih razlogov zamenjajte cucelj po dveh mesecih uporabe. **Pazite** na praske ali lome na zbiralnikumleka - te lahko povzročijo lom, kar predstavlja nevarnost pred poškodbo. Zaprt zbiralnik napolnjen s hrano **nikakor** ne sme biti ogrevan v mikrovalovni pečici - možnost eksplozije/poškodbe materiala. Neenotno gretje predstavlja nevarnost opeklin z vsebino zbiralnika. Izdelek ustreza standardu EN 14350. Brez BPA. **Prosimo shranite navodila za uporabo.**

**Zastopnik: Bogart d.o.o., Pšata 81a, 1262 Dol pri Ljubljani, tel.: 01 562 82 27, info@bogart.si**